



### Instructions d'emploi

Il convient de respecter les instructions d'emploi chaque fois que le masque est porté.

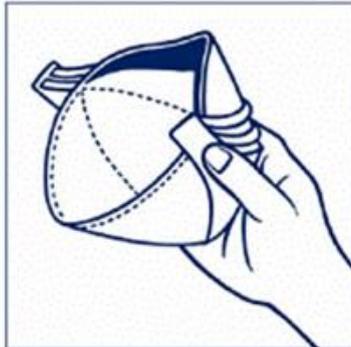

1. La barrette nasale est située sur la partie supérieure. Incurver délicatement le centre de la barrette nasale. Tenir le masque dans une main et ouvrir la partie inférieure pour l'incurver vers l'avant.

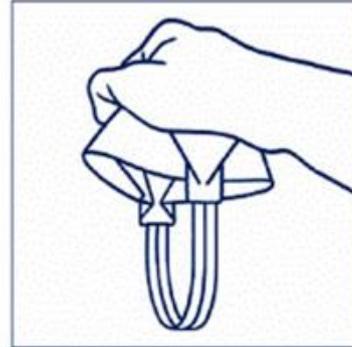

2. Retourner le masque pour faire tomber les élastiques.



3. Placer le masque sous le menton et passer les élastiques derrière la tête.



4. Placer l'élastique inférieur au-dessous des oreilles et l'élastique supérieur sur le sommet de la tête. Ajuster les parties inférieures et supérieures pour qu'elles s'adaptent confortablement au visage.



5. En utilisant les deux mains, adapter la barrette nasale à la forme du nez.



6. Pour vérifier que le masque est bien ajusté, placer les deux mains en coquille sur le masque et inspirer très fortement. Si l'air circule autour du nez, ajuster la barrette nasale.

Note : Ne pas utiliser avec une barbe ou toute autre pilosité faciale, susceptibles de réduire l'étanchéité du masque au visage.

**LA SANTE DE CHACUN EST L'AFFAIRE DE TOUS!**